



# INSTRUCTION DES FRAISES COURTAIN

## GARANTIE

Chaque fraises en céramique ou tungstène est soigneusement contrôlés et vérifiés dans notre atelier.

**Garantie 1 ans. \***

### **A SAVOIR\***

Ces fraises sont élaborées et fabriquées en partenariat avec un fabricant respectant nos cahiers des charges pour les pédicures-podologues.

La décoloration, les tâches brunes ou jaunâtres sont principalement liées :

- **Stérilisation pas sèche.**
- **Immersion hors des délais du produit décontaminant.**
- **Quantité trop important du décontaminant.**
- **Ne pas mélanger un appareil corrodé avec de nouveaux instruments.**

Dentelure altéré :

- **Vitesse de rotation trop importante.**
- **Fraise non adaptée à pathologie unguéale.**

Tige cassée ou vrillée :

- **Chute de la fraise avec la pièce main.**

## NETTOYAGE

### **BAC A ULTRASONS**

Le nettoyage par ultrasons n'est pas recommandé, cela peut endommager les bagues des fraises. Suivez les instructions du fabricant. Rincer les pinces abondamment avec de l'eau, et bien sécher avant de les stériliser.

### **BAC A DECONTAMINATION\***

Utilisez correctement et uniquement les produits recommandés. Nettoyez les dentelures à l'aide d'une brosse en nylon, afin d'enlever le débris d'ongles et/ ou de peaux.

## STERILISATION\*

### **AUTOCLAVE A VAPEUR**

Inspectez les fraises avant des les mettre sous sachets de stérilisation.

Les fraises peuvent subir des variations de :

- **Température de 121° à 134°.**
- **Pression de 2060mbar à 3050mbar**
- **Temps de 5mn à 99 mn.**

Retirez immédiatement les fraises lorsque le cycle est terminé pour éviter les signes éventuels de corrosions ou décoloration.

## VITESSE DE ROTATION\*

Augmenter la durée de vie de vos fraises,

- **Toujours respecter la vitesse de rotation.**
- **Choisir une fraise en fonction de la pathologie unguéale**
- **Vérifier les roulements ou charbons de votre pièce à main**

